

AED Web Manager

AED情報管理サービス

AEDのための管理サービス

**お知らせ
メール機能**

消耗品期限をお知らせします

**AED情報を
一元管理**

WEB上で管理

情報変更も自由

ご自身でできます

こんなのがあったんだ!




こんな声にお応えします

- ≫ 経費をかけられない
- ≫ 消耗品の期限管理が大変
- ≫ 外出先でもAED情報を確認したい

管理業務を
トータルサポート
いたします



コストは
かかりません

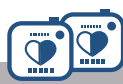

何台でも
登録可能



ネットに繋がれば
いつでもアクセス

◎ スマートフォン、タブレット端末からは

右のQRコードを
読み取って下さい



◎ パソコンからは

下記のURLにアクセスしてください
<https://aedguardian.com>


[スマートフォン、タブレットから登録する方へ]
受信拒否設定をしている場合には、設定を解除していただくか「@aedguardian.jp」
を受信リストに加えていただくようお願い致します

※フィリップス社製AED製品をご購入頂いたお客様のみご利用いただけるサービスです。対象製品：ハートスタートFR2、ハートスタートHS1、ハートスタートFRx、ハートスタートFR3

AED Web Manager


AED情報管理サービス

サービスのイメージ

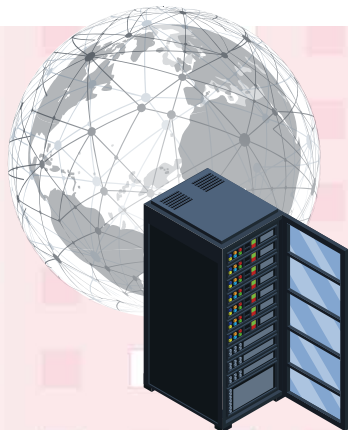

WEBで確認ができます
登録したAED情報を一元管理

お知らせメールサービス
消耗品の有効期限接近

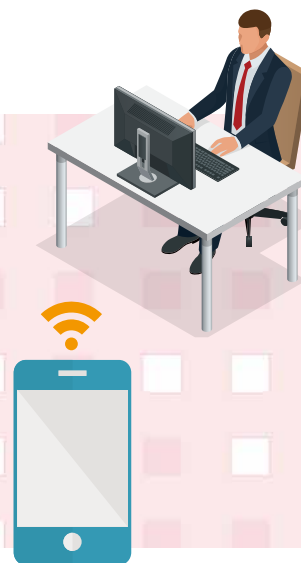

登録AEDリスト画面

登録AEDリスト										ヘルプ	ログアウト
AED追加登録										アカウント編集	
No.	設置場所	AED情報			バッテリー	AED消耗品次回交換時期				削除	
		AED製品名	AEDシリアル番号	AED保証期限		成人用パッド1	成人用パッド2	小児用パッド1	小児用パッド2		
1	A学校	ハートスタートFR2 波形表示あり	B16C-12034	2020年09月04日	2020年05月31日	2017年09月30日	2017年09月30日	2020年10月31日	2020年10月31日	削除	
2	B公園	ハートスタートHS1 シリーズ	A15C-56203	2022年06月07日	2020年02月29日	2019年06月30日	2019年06月30日			削除	
3	C病院	ハートスタートFR3 波形表示あり	C15L-95460	2022年12月23日	2020年08月31日	2020年08月31日				削除	

※編集をする際は設置場所名をクリックしてください。

Copyright FUKUDA DENSHI All rights reserved.

管理サービスとして、遠隔監視機能の付いた「AEDガーディアン」(有料サービス)もごございます。
「AEDガーディアン」についての説明は、下のURLから、ご覧ください。



<http://www.fukuda.co.jp/aed/>

AED設置者及び管理者は品質保証及び安全管理の為、以下の内容の確認をお願いいたします。

1. AED設置の際はAED管理者を設置し、製造販売業者の推奨する保守点検を行い、いつでも使用できる状態に管理する事。特に電極パッド・バッテリーの使用期限の確認及び、期限内の交換は確実に実施する事。 2. AED設置者及び管理者は、AED管理表示ラベル上に明記された消耗品等の使用期限を確認する事。 3. AED設置者及び管理者は、AEDに不測の事態が発生した時及び、譲渡時(高度管理医療機器等販売業の許可業者に限る)、廃棄時には、製造販売業者又は販売業者等の連絡先に連絡する事。製造販売業者又は販売業者からの情報提供方法等(交換時期のお知らせ等)について確認する事。 4. 電極パッドは使い捨てなので、再使用する事は禁止である。

※フィリップス社製AED製品をご購入頂いたお客様のみご利用いただけるサービスです。
対象製品：ハートスタートFR2、ハートスタートHS1、ハートスタートFRx、ハートスタートFR3

詳細については、お近くのフクダ電子販売会社へお問い合わせください。