

災害避難時の対応方法

< 避難の前の最終チェック >

1 あわてず安全確保



グラツきたら
まず、身の安全



正しい情報を聞く
(テレビ、ラジオ)




落ち着いて
火の元の確認





療養者の容態と
人工呼吸器の確認

2 内部バッテリーの確認

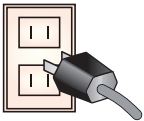

ACコンセントを抜き、内部バッテリー駆動にして正常に動作しているか確認して下さい。 ※停電時は自動的に内部バッテリーに切り替わります。

クリーンエア VS INTEGRA (インテグラ) VS ULTRA (ウルトラ) の場合

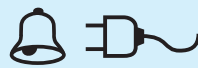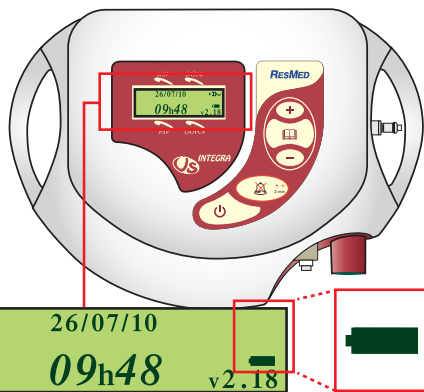

内蔵バッテリーに切り変えた場合
左のアイコンが表示されます。



アラーム一時消音キーを押して
ください。

内蔵バッテリーアイコンのみが表示

※アラーム消音ボタンを数回押してもアラームが鳴りやまない場合は、他の原因が考えられます。詳しくは取扱説明書をご参照下さい。

3 事業者(医療施設)への連絡



安否確認のため、下記の番号に連絡して下さい。

災害用伝言ダイヤルのご利用法

伝言の録音方法

171 にダイヤル

▽ガイダンスが流れます

録音の場合 1

▽ガイダンスが流れます

(×××)××× ××××

伝言の再生方法

171 にダイヤル

▽ガイダンスが流れます

再生の場合 2

▽ガイダンスが流れます

(×××)××× ××××

4 安全な場所へ避難する

ご自宅から避難する場合は、裏面の避難先カードを目立つ所に貼って下さい。



万が一の災害に備えましょう

災害時の心構え

✓ 家族の連絡方法、連絡先を確認しておきましょう。

- 連絡方法は？
- 家族に連絡が繋がらない時はどの親戚、知人に連絡しますか？
- 連絡が取れない場合の待ち合わせ場所は？



✓ おうちの安全を確認しましょう。

- 倒れてきたら危ない家具はありませんか？
- 避難路は確保できていますか？



✓ 非常持ち出し品を準備しておきましょう。

- 貴重品／ラジオ／懐中電灯／携帯電話／杖／めがね／単三乾電池等
いつもの薬 _____
苦しいときの薬 _____
- その他 _____



✓ 避難場所・連絡先を記入しておきましょう。

避難場所	
------	--

緊急連絡先	
-------	--

緊急時に備えてあらかじめ書いておきましょう。

ご自宅から避難される場合は避難先カードを目立つところに貼ってください。↓

避難先カード

お名前

避難先

連絡先1

連絡先2

特記事項